

MEDLANCE®

safety lancets *plus*

CE 0344

의료기기

[수입업자] (주)한독, 서울시 강남구 테헤란로 132 한독빌딩 15층

TEL. 02-527-5114, <http://handok.co.kr>

[제조원] HTL-STREFA S.A. 폴란드

[허가번호] 수인 13-813호

[제품명] Medlance Plus

[품목명] 일회용자동랜셋(A53070.04, 2등급)

[모델명] Medlance Plus Super Lite

[중량 또는 포장단위] 1 box(100 pcs/box)

[일회용]

[재사용금지]

[사용목적] 채혈 등을 목적으로 사용하는 일회용 자동형 기구

STERILE R




Medlance Plus, safety lancet type 553

[사용방법]

가. 사용전의 준비사항

- 1) 포장에 이상이 없는지 확인하고 멸균표시 및 멸균상태를 확인한다.
- 2) 유효기간을 확인한다.
- 3) 제품에 포함된 사용설명서를 충분히 숙지한 후 사용한다.

나. 사용방법 및 조작순서

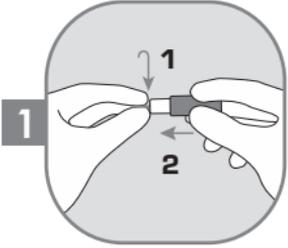

1 채혈 부위를 소독한다.
보호덮개를 돌린 후
똑바로 잡아
당겨 제거한다.



2 Medlance® Plus를
채혈 부위에 대고
눌러 침이 채혈
부위를 찌르게 한다.



3 채혈 부위 근처를
부드럽게 압박
하여 필요한 양의
혈액을 얻는다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 사용된 침은 1회용이므로, 사용 후에는 절차에 따라 지정된 용기에 담아 안전하게 폐기한다.

[사용 시 주의사항]

1. 채혈을 위해 손가락, 발뒤꿈치, 귀에만 사용한다.
2. 일회용 제품이므로, 보호덮개가 파손되었거나, 침이 보호덮개 밖으로 노출되어 있는 경우에는 사용하지 않는다.
3. 사용기한이 지난 제품은 사용하지 않는다.

[보관 또는 저장방법] 실온의 건조한 곳에 보관한다.

- 1) 온도 : 5 ~ 40°C
- 2) 습도 : 40 ~ 65%RH

[첨부분서의 작성연월] 2019년 1월

Manufactured by:
HTL-STREFA S.A.
Ul. Adamówek 7,
95-035 Ozorków,
Poland
T:+48 42 270 00 10
F:+48 42 270 00 20
www.htl-strefa.com
Made in Poland